

赤外線離床センサ お気持ちさっちゃん

高齢者のお気持ちを察知して、
ゆとりあるケアへ！！
転倒、徘徊などのリスク対応に



● ゆとりあるケアへ！

端座位をとられる前の起き上がりをお知らせできます。
高齢者のお気持ちを尊重しながらの、手厚い見守り、
ゆとりあるケアをサポートします。

● 安心・安全な環境づくりへ！


2つの赤外線センサの組合せで、より正確な検知に
配慮した設計となっています。
検知の早さも大切ですが、検知の正確性を重視する
ことで「安心・安全な環境づくり」をお手伝いします。

● リスクマネジメント対応に！

居室内での転倒でお困りの方が多いようです。
転倒、徘徊などの高齢者リスク対応としても
お役立て下さい。



2つのセンサで「見守り」します

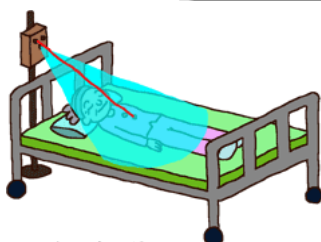

● 反射型赤外線センサ
● モーションセンサ

センサーイメージ

モーションセンサー（人の動きを感知）


広角エリアにおいて、人が動くとセンサーが
感知します。

反射型赤外線センサー（人の存在を感知）

センサーからの照射ビームが人体により反射される
ことで、人の起き上がりと判断します。

※TAISコード 01509-000001

仕様

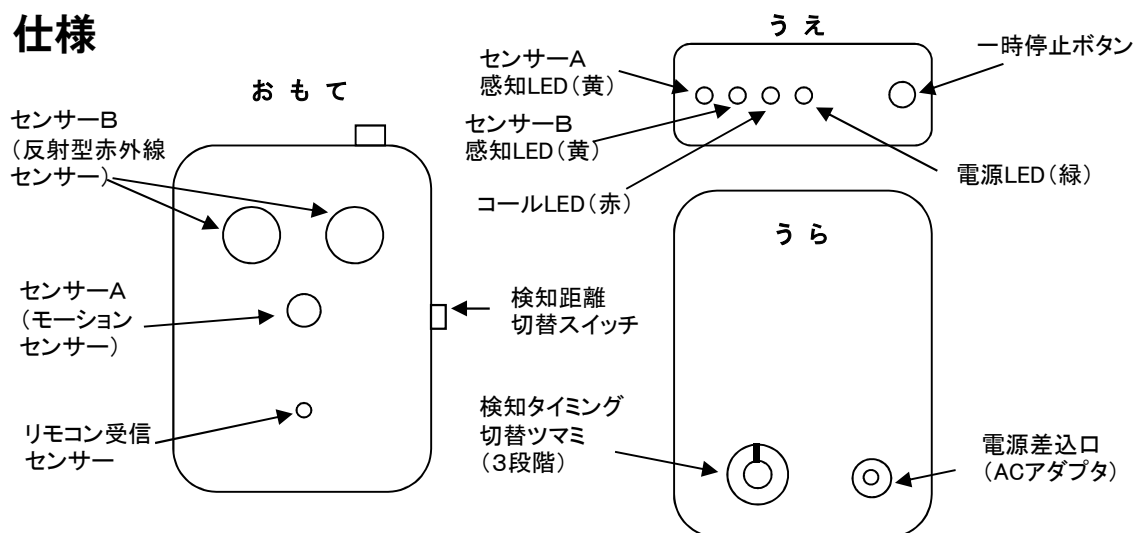


赤外線センサー（ナースコール接続・有線式）

- ・サイズ（本体）： 80mm×125mm×32mm
- ・センサー： ①モーションセンサー（焦電センサー）
②反射型赤外線センサー（測距センサー）
- ・検知タイミング設定： 3段階切替
- ・検知範囲： ①モーション（水平：38° 垂直：22° 距離：5m）
②反射型（直進性、距離：1.3m以内 or 2.0m以内）
- ・センサー感知状態、コール状態はLEDにて確認可能
- ・介助中など一時停止したい場合は、ボタン操作にて5分間停止。
（リモコンは別売オプション）
- ・取付： 専用ポール（105cm（組立式）：標準装備）に取付
- ・ナースコール接続： 専用中継器（標準：2芯ナースコール対応、その他応相談）

接続例

センサ本体とナースコール中継器を接続します。現在お使いいただいているナースコール押ボタンを中継器に接続していただければ、離床センサとナースコールを同時にお使いいただけます。

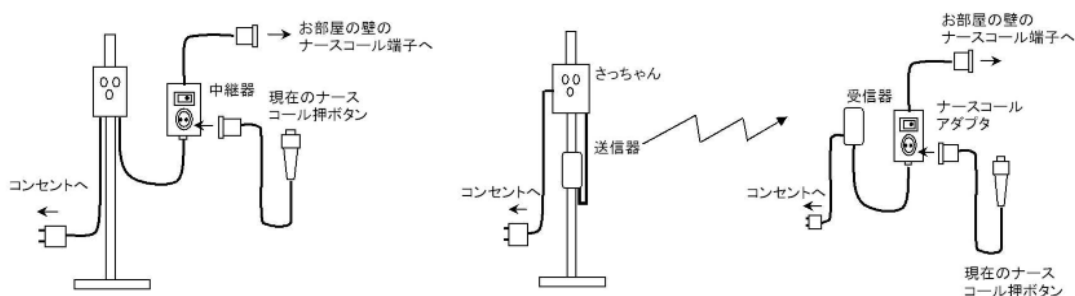

※オプション品で離床センサとナースコール間を無線化することができます。（無線ユニット）

注意：この製品は起き上がり検知を目的としており、転落・転倒を直接的に防止することを保証するものではありません。

製造開発/販売

MES 株式会社 **マイクロ電子サービス**
MICRO ELECTRONICS SERVICE CORP.

本社 〒880-0211

宮崎県宮崎市佐土原町下田島19370

TEL(0985)73-0531

FAX(0985)73-6829

鹿児島 熊本

URL <http://www.m-mes.co.jp>

※デモ機（無料貸出）も準備しております。

お気軽にお問合せ下さい。

本社 担当 川添(かわそえ)まで