

赤外線離床センサ

お気持ちさっちゃんmini

★色々な使い方ができます！★

お気持ちさっちゃんminiは、検知したい場所に置くだけ。



起き上がり検知

早めの検知を求められる方におススメ！


ベッドの頭元に、センサーを置くだけ！
対象者の方が上体を起こされた時点で検知。

設置例

仰臥位または側臥位



端座位

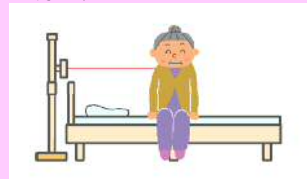


センサーの高さを仰臥位または側臥位では触れないような位置、
端座位で肩から胸くらいの位置にすると効果的です。

離床検知

故障が少ない！

設置例

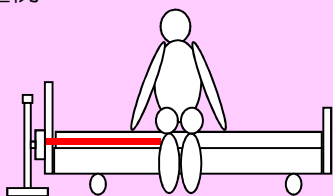

ベッドの足元に、センサーを置くだけ！
対象者の方が端座位になるときに、足がベッドから降りてきた時点で検知。

マット型センサーと異なり、非接触式なので、
故障が少ない！


また、マット型センサーは、例えば、端座位を
保持する場合、コールが鳴り続けますが、
さっちゃんminiの場合、最初の足を降ろした
時点のみのコールとなります。

取り付けが簡単にできます！

取付はバンドタイプですので、簡単にできます。
また、バンドに滑り止めシートがあるので、女性でも
簡単で、しっかりと取り付けられます。




仕様

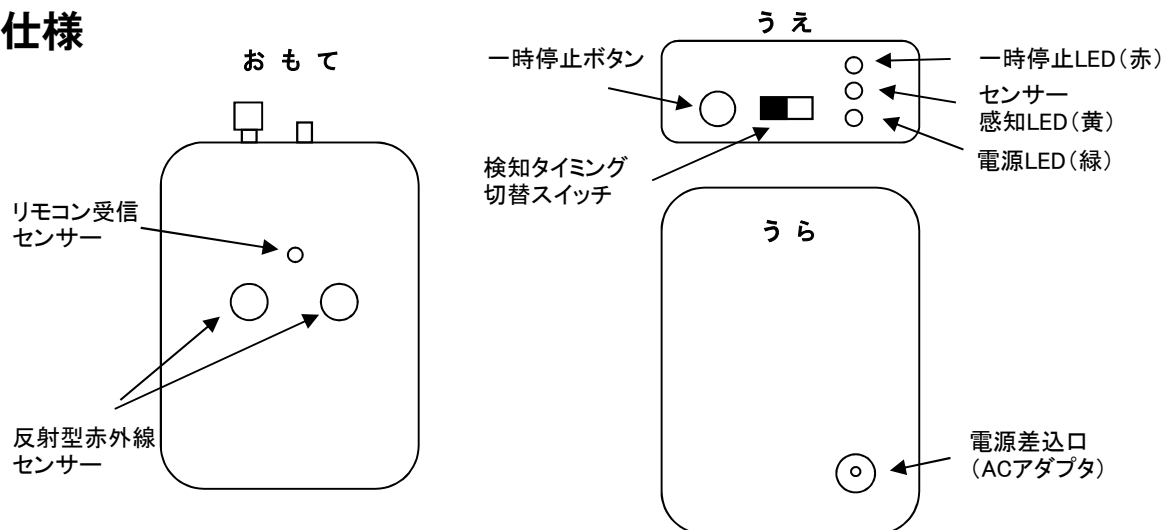

- 赤外線離床センサー お気持ちさっちゃんmini (ナースコール接続・有線式)
- ・サイズ (本体) : 70mm×105mm×35mm
 - ・センサー : 反射型赤外線センサー
 - ・検知タイミング設定 : 2段階切替 (0.2秒、1秒)
 - ・検知範囲 : 直進性、距離: 1.3m
 - ・センサー感知状態、一時停止状態はLEDにて確認可能
 - ・介助中など一時停止したい場合は、ボタン操作にて5分間停止。
5分間の一時停止後は、自動復旧。
 - ・(赤外線リモコン (別売オプション) でも操作可能)
 - ・取付 : 専用ポール (105cm (組立式)) : 標準装備) に取付
 - ・ナースコール接続 : 専用中継器 (標準: 2芯ナースコール対応、その他応相談)

接続例

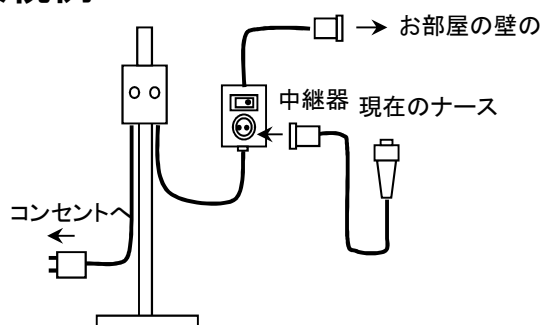

センサ本体とナースコール中継器を接続します。
現在お使いいただいているナースコール押ボタン
を中継器に接続していただければ、離床センサと
ナースコールを同時にお使いいただけます。

注意: この製品は起き上がりや離床検知を目的としており、転落・転倒を直接的に防止することを保証するものではありません。

製造/開発

MES 株式会社 **マイクロ電子サービス**
MICRO ELECTRONICS SERVICE CORP.

本社 〒880-0211

宮崎県宮崎市佐土原町下田島19370

TEL (0985) 73-0531

FAX (0985) 73-6829

鹿児島 熊本

※デモ機 (無料貸出) も準備しております。

お気軽にお問合せ下さい。

本社 担当 川添 (かわそえ) まで